



DEMI-MASQUE À CARTOUCHES


RETRAIT

À L'EXTÉRIEUR dans le SAS ou au corridor



1 HDM. Enfiler des gants propres

2 Sortir 4 lingettes et les déposer sur une surface propre

3 Retirer le masque et le déposer sur une lingette.

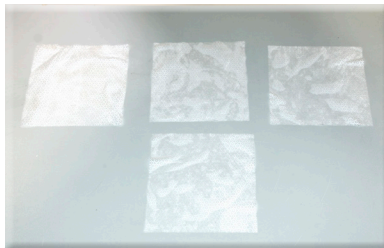

4 Retirer les 2 cartouches, avec 1 lingette pour chaque cartouche, et les déposer sur la table.

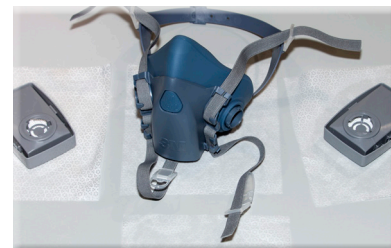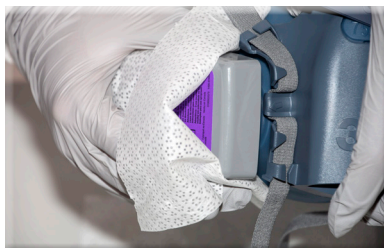

5 À l'aide de la lingette sous le masque, **désinfecter** le masque de l'intérieur vers l'extérieur.

6 Placer le masque dans le contenant pour retraitement.

7 Retirer les gants.




8 HDM • Enfiler de nouveaux gants propres

9 Ouvrir un nouveau sac de papier préalablement identifié.

10 Désinfecter les cartouches avec leurs lingettes appropriées.

(Temps de contact = 1 minute)

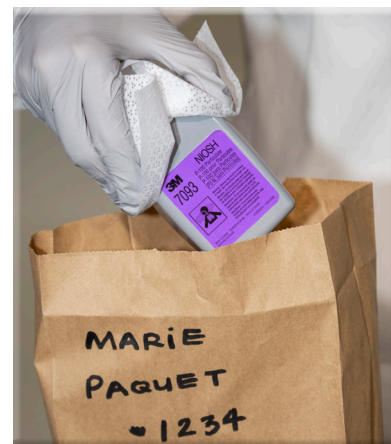

ATTENTION : S'ASSURER QUE DES LIQUIDES N'ENTRENT PAS EN CONTACT AVEC LE MÉDIA FILTRANT À L'INTÉRIEUR DU BOITIER

11 Placer les cartouches dans le sac de papier pré identifié.

12 Nettoyer et désinfecter la surface de la table, avec la lingette restante.

13 Retirer les gants, **HDM.**

14 Refermer le sac et l'entreposer à l'endroit désigné.