



DEMI-MASQUE À CARTOUCHES

UTILISATION

Assemblage

Installation filtres P-100

- 1 HDM.**
- 2 Enfiler des gants. Aligner** les formes du filtre.
- 3 Pousser et tourner** d'un quart de tour.



Mise en place du masque

- 4 Placer** le respirateur au visage :
 - courroie de tête;
 - courroies inférieures au dos du cou.
- 5 Ajuster** les courroies.



**EFFECTUER UNE VÉRIFICATION DE L'AJUSTEMENT
PAR PRESSION NÉGATIVE ET POSITIVE AVANT CHAQUE UTILISATION**

Essais d'étanchéité

Pression négative

- 6 Recouvrir** les filtres et presser fermement avec les mains.
- 7 Inspirer** par la bouche.
- 8 Si fuite d'air**, repositionner le masque, resserrer les courroies et refaire essai pression négative.
- 9 Aucune fuite d'air**, effectuer ajustement pression positive.



Pression positive

- 10 Recouvrir** la soupape d'expiration avec la paume de main.
- 11 Expirer doucement** par la bouche.
- 12 Si fuite d'air**, repositionner le masque, resserrer les courroies et refaire essais pression négative et positive.
- 13 Aucune fuite d'air**, vous pouvez entrer.



**ATTENTION : SI VOUS N'ARRIVEZ PAS À OBTENIR UN AJUSTEMENT PARFAITEMENT ÉTANCHE,
NE PAS ENTRER DANS LA ZONE CONTAMINÉE**

Pour tous les patients non confirmés COVID et les procédures stériles

Installation du masque chirurgical

- 1 Placer le masque chirurgical à la verticale** devant le respirateur.
- 2 Attacher** les attaches du masque au niveau du cou.
- 3 Bien recouvrir** toute la surface de la soupape d'expiration avec le masque.

