


# Philips IntelliVue accès Web

## Guide d'utilisation rapide

L'application IntelliVue Web permet de consulter les tracés ECG des patients munis d'une télémétrie. Il ne s'agit pas d'une application de surveillance clinique mais plutôt d'une application de consultation qui permet au personnel clinique de consulter les événements enregistrés et les tracés en temps réel.

Pour débiter une session IntelliVue Web, cliquer sur le dossier **Clinique** situé sur le bureau. Sélectionner ensuite le raccourci **Philips Télémétries WEB**.

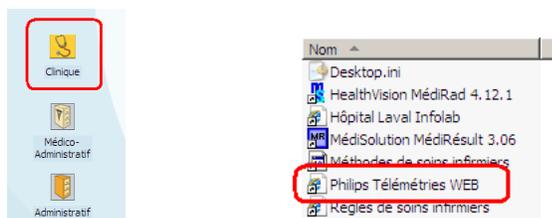

Une page Internet Explorer s'ouvre et vous demande de vous identifier.

### Centre d'information Web™ Connexion

Nom utilisateur:

Mot de passe:



**Un compte d'utilisateur générique a été créé. Les informations de connexion vous seront fournies à votre arrivée par la Direction de l'enseignement universitaire.**


**Le nom d'utilisateur et le mot de passe doivent être entrés en minuscules.**

**Il est important de ne pas modifier le mot de passe lors d'une session puisque ce compte est commun à tous les utilisateurs.**

Dès l'ouverture d'une session la page d'accueil de l'application vous présente la liste des patients sous télémétrie. On y affiche le numéro du lit, le prénom, le nom et le numéro de dossier du patient.

Liste Patients			
Patient sélectionné: Aucun patient sélectionné			
Patients sur serveur: DBSILVAL			
Lit:	Prénom:	Nom:	Numéro dossier médical:
<b>CORO</b>			
<a href="#">2314A</a>	JEAN-MARC	32	64525
<a href="#">2314B</a>	PYER	48	50323
<a href="#">2315A</a>	AGNES	16	33705
<a href="#">2315B</a>	GILBERT	18	64642
<a href="#">2345A</a>	REAL	34	63904
<a href="#">2365B</a>	RAYNALD	43	25764
<a href="#">2417A</a>	THERESE	37	68403
<a href="#">2456P</a>	THERESE	37	75107
<a href="#">3103A</a>	RENEE	71	37714
<a href="#">3104A</a>	RENEE	71	38584
<a href="#">3104B</a>	LOUIS-PAUL	80	66384
<a href="#">3104D</a>	LOUIS-PAUL	80	64945
<a href="#">3107P</a>	LAURENT	72	64618
<a href="#">3121A</a>	ALAIN	75	44249
<a href="#">3124B</a>	FRANCE	69	34591
<a href="#">3126A</a>	SIMONE	85	64205
<a href="#">3135B</a>	FELICIE	70	53199
<a href="#">3137A</a>	FELICIE	70	60180
<a href="#">3137B</a>	FELICIE	70	59408
<a href="#">3156B</a>	ANDRE	79	45149
<a href="#">3158B</a>	RAYMOND	74	20341


En cliquant sur le lit du patient (hyperlien souligné), un écran affiche les dérivées du patient sélectionné déterminées par le poste de surveillance de l'unité coronarienne.

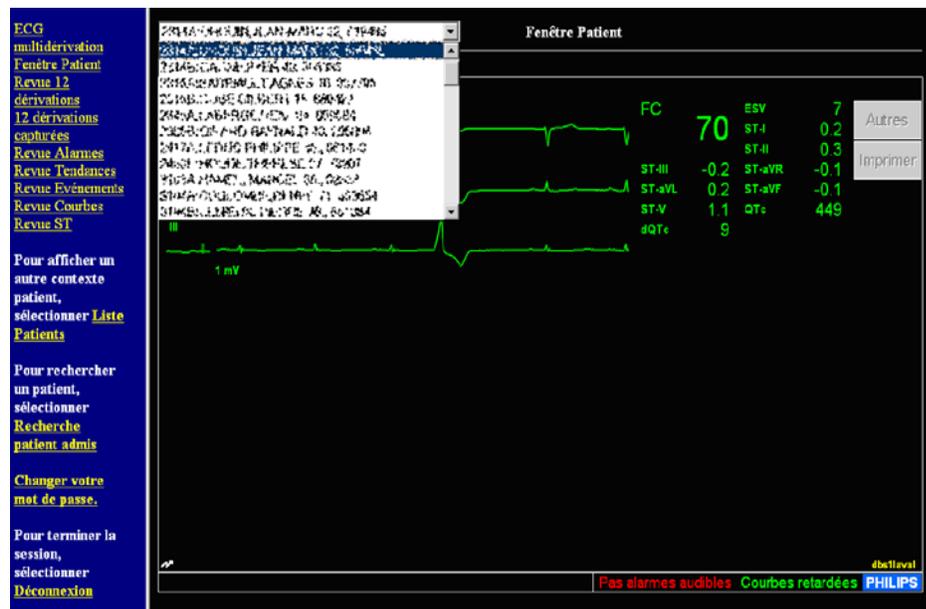

Pour visualiser les tracés des alarmes sauvegardées par le personnel infirmier attitré à la surveillance des télémétries, cliquer sur le lien **Revue Alarmes** et sélectionner **Séquences Mémorisées par l'utilisateur**.



En cliquant sur le lien **Revue Événements**, une liste des événements enregistrés sera affichée. Vous pouvez sélectionner l'un ou l'autre des événements pour en afficher le tracé.

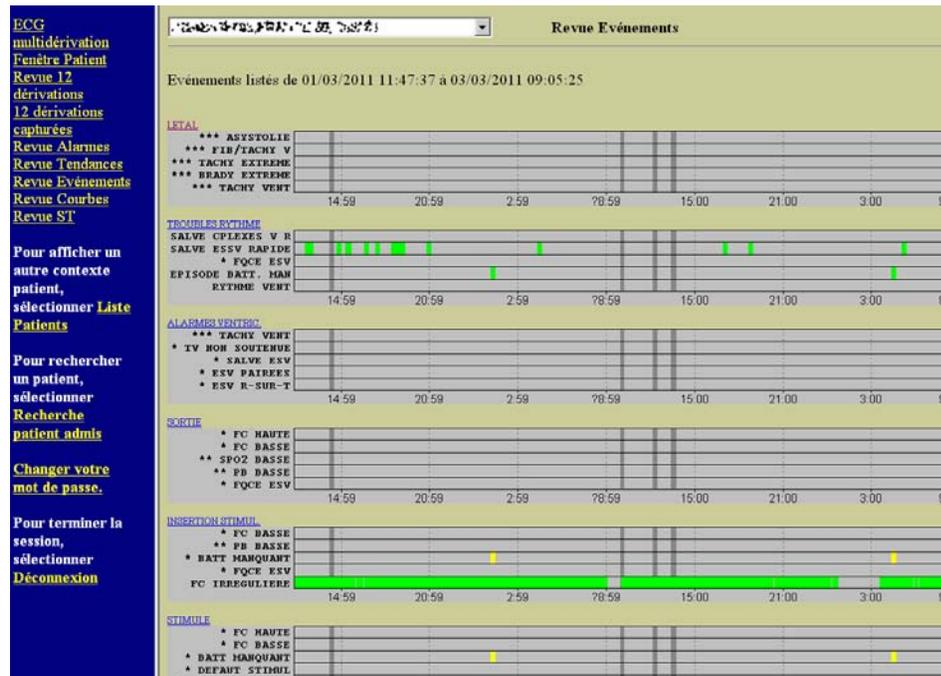



Notez qu'après 15 minutes d'inactivité la session se ferme automatiquement et demande une nouvelle ouverture.

À la fin de la consultation, cliquer sur la fonction **Déconnexion** située au haut de l'écran.